

Складной переносной массажный стол двух секционный



Вариант исполнения	Артикул	Модель
JFMS07/10	TS20110S_C	OPTIMA
JFMS07/10	TS20110S_W	OPTIMA
JFMS07/10	TS20110S_Gr	OPTIMA
JFMS07/10	TS20111_P	RELAX
JFMS07/10	TS20111_M	RELAX
JFMS07/10	TS20111_Gr	RELAX
JFMS07/10	TS2021D_BC	RELAX
JF-AY01	TS20112_B	RELAX
JFAL01A	TS2010_OB	ELEGANT PREMIUM
JFAL01A	TS2010_OB2	ELEGANT PREMIUM
JFAL01A	TS2010_TB	ELEGANT DELUX
JFAL01A	TS2010_TB2	ELEGANT DELUX
JFAL01A	TS2010_R	ELEGANT OPTIMA




Руководство пользователя

Важные предупреждения



1. При сборке убедитесь, что все винты зафиксированы и фиксирующий трос не порван и не изношен. Убедитесь, что нет трещин на алюминиевой структуре.
2. Не перегружайте стол за пределы рекомендованного веса пользователя. Это может привести к серьезной травме пользователя. Данный продукт протестирован при максимальной рабочей нагрузке 250 кг.

3. Не используйте чистящие средства, на основе спирта при чистке винилового покрытия. Это может привести к повреждению винилового материала. Используйте теплую мыльную воду и вытрите насухо.
4. Убедитесь, что при использовании стола все четыре ножки находятся на одном уровне. Использование ножек на разных уровнях может привести к неустойчивости стола и к травме.
5. Не позволяйте детям собирать или разбирать массажный стол, если они не под наблюдением.
6. Будьте осторожны при использовании острых предметов, поскольку они могут повредить покрытие. Держите покрытие стола подальше от контактов с острыми предметами.

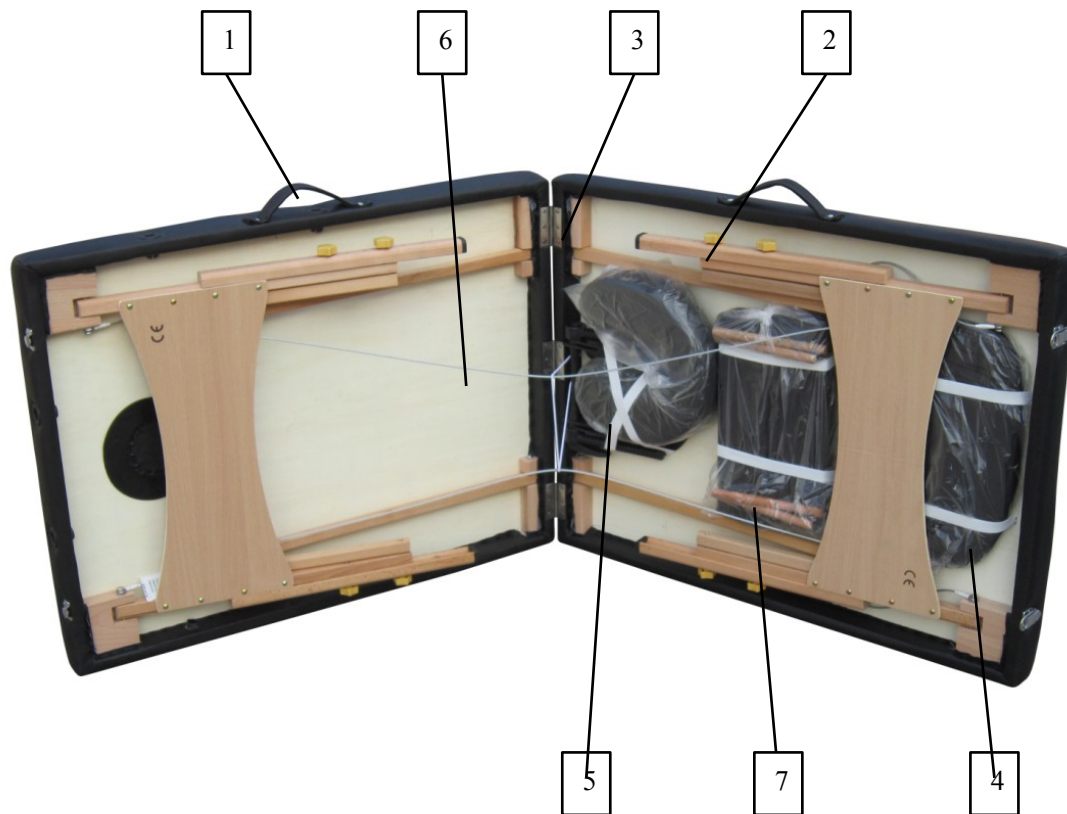

- | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| 1. Ручка | 2. Регулировочная ручка | 3. Крепление | 4. Лямка |
| 5. Подголовник | 6. Фиксирующий трос | 7. Боковые опоры | |

Сборка стола

Этапы сборки указаны ниже:





4



5



6

1. Расстегните застёжку.
2. Положите стол на бок на пол, откройте стол с четырьмя максимально вытянутыми ножками.
3. Достаньте все принадлежности и затем поднимите стол вверх, пока ножки не встанут на пол.
4. Вставьте каркас подголовника в соответствующие отверстия и разместите подушку подголовника в каркас.
5. Наденьте подголовник, затем вставьте подлокотники с обеих сторон стола в отверстия.
6. Стол готов к использованию.

Высота стола регулируется с помощью кнопок на ножках. Все четыре ножки должны быть отрегулированы таким образом по очереди. Убедитесь, что все ножки отрегулированы на одинаковом уровне высоты.

Складывание и транспортировка стола



1. Снимите все аксессуары.

2. Положите стол на бок.
3. Положите все аксессуары под эластичные фиксирующие тросы под верхний шпон.
4. Сложите стол и зафиксируйте застежку.
5. Положите массажный стол в сумку для переноски.

Носите стол как чемодан, взявшись за ручку.

Внимание: Если рама/ножки/конструкция стола повреждены в каком-либо месте, вам не следует использовать стол. Использование стола с повреждениями может причинить вред или серьезные травмы для вас или вашего пациента. Следует немедленно устранить все неполадки.

